

Tagging vejledning - Infusionspumpe, Braun Infusomat Space

Beskrivelse:

Infusionspumpe, Braun Infusomat Space

Valg af RFID tag ud fra 3 brugsscenarier:

- Enkeltvis
- i rack med op til 4 pumper
- i stabel med andre pumper

Monteringsflader er plast, plast med metal/metal folie bag

Dogbone M750 på toppen af pumpe placeres i midten bagerest på pumpen.
Dogbone M750 tag vist som billede.

Confidex Silverline Blade II placeres på højre side, set fra fronten.
Confidex Silverline Blade II har et foldet antenne design. Enden med foldet antenne skal pege fremad.

Dogbone M750 på toppen læses når emne transporteres alene og hvis emne sidder øverest i stabel. Dækkes tag af en anden pumpe læses den ikke

Confidex Silverline Blade II læses når emne er stablet eller placeret i rack

Montering af begge tag, vurderes ud fra brugsscenarie

Ved montering af 2 tags, kodes de med samme ID.

Husk at rengøre / desinficere før montering

RFID tag:

Silverline Blade II

Confidex




On/off metal, RFID label tag, optimized for metal
Ambient temperature up to +85C - IP68
Impinj M730 chip
Label har et foldet antenne design der læses bedst når den monteres tæt på metalkant.

RFID Tag - Udvalgelses kriterier:

Montering

Metal / plastik overtrukket metal / plastik metalfolie bag	Ja
Monteres på håndholdt udstyr	Ja

RFID Tag - Test resultat:

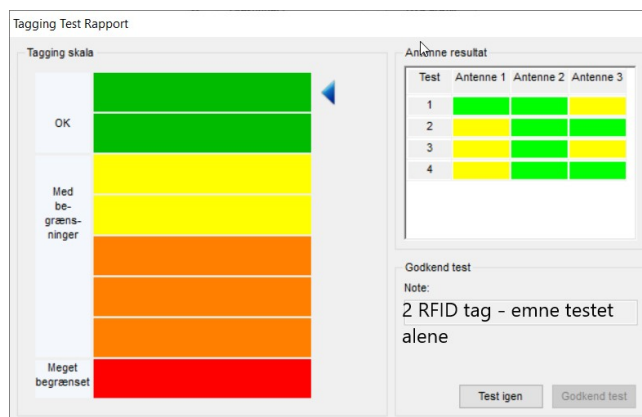

Note:

Tagging vejledning - Infusionspumpe, Braun Infusomat Space

Billeder:



Tagging vejledning - Infusionspumpe, Braun Infusomat Space

Billeder:



Tagging Test Rapport

Tagging skala

OK	
Med be- græn- ninger	
Meget begrænset	

Antenne resultat

Test	Antenne 1	Antenne 2	Antenne 3
1			
2			
3			
4			

Godkend test

Note:

2 RFID tag - emne testet i
stabel / rack

Test igen

Godkend test