

Tagging vejledning - Infusionspumpe, Braun Perfusor Space

Beskrivelse:

Infusionspumpe, Braun Perfusor Space

Valg af RFID tag ud fra 3 brugsscenarier:

- Enkeltvis
- i rack med op til 4 pumper
- i stabel med andre pumper

Monteringsflader er plast, plast med metal/metal folie bag

Dogbone M750 på toppen af pumpe placeres så tæt på front som muligt. Det er ok at placere den bag det gennemsigtige plast stykke

Siva Mom 6024 tag placeres under hætte på håndtag. Tag placeres ud til kanten eller skråt på håndtag.

Siva Mom 6024 har et foldet antenne design. Enden med foldet antenne skal pege fremad.

Siva Mon 6024 tag er vist som billede.

Dogbone M750 på toppen læses når emne transporteres alene og hvis emne sidder øverest i stabel. Dækkes tag af en anden pumpe læses den ikke

Siva Mom 6024 på håndtag understøtter læsninger når emne er stablet eller placeret i rack

Montering af begge tag, vurderes ud fra brugsscenarie

Ved montering af 2 tags, kodes de med samme ID.

Husk at rengøre / desinficere før montering

RFID tag:

Smartrac Dogbone M750

Smartrac



Off-metal, ambient temperature up to +85C

Impinj M750 chip

RFID Tag - Udvælgelses kriterier:


Montering

Metal / plastik overtrukket metal / plastik metalfolie bag Ja

Monteres på håndholdt udstyr Ja

RFID Tag - Test resultat:


Tagging Test Rapport

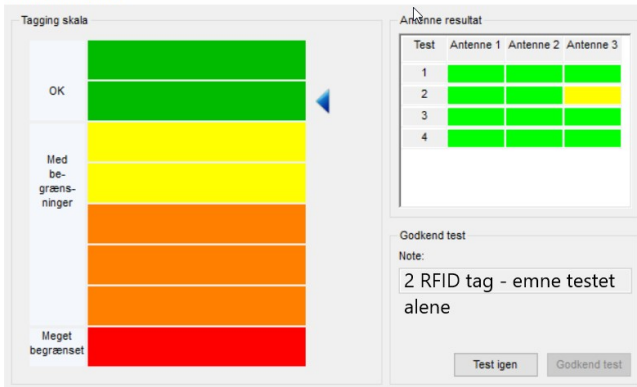

Note:


Tagging vejledning - Infusionspumpe, Braun Perfusor Space

Billeder:

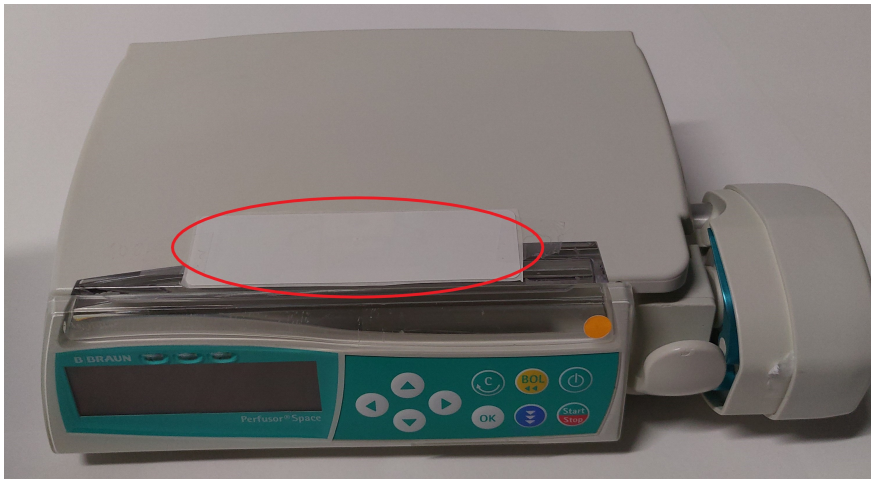

Tagging vejledning - Infusionspumpe, Braun Perfusor Space

Billeder:

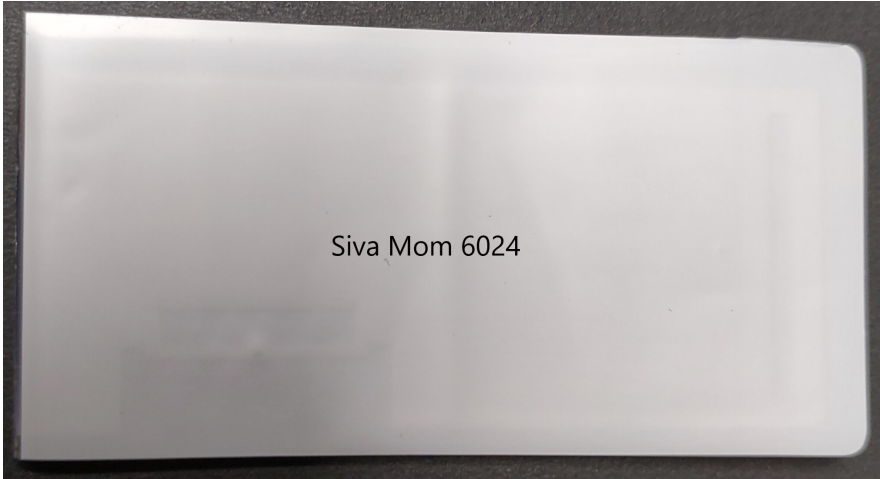

Tagging Test Rapport

Tagging skala

OK

Med be-græns-ninger

Meget begrænset

Antenne resultat

Test	Antenne 1	Antenne 2	Antenne 3
1			
2			
3			
4			

Godkend test

Note:

2 RFID tag emne testet
placeret nederst i stabel

Test igen

Godkend test